

Quick 3

110 830

Ausarbeitungsset mit 6 verschiedenen Instrumenten zur Ausarbeitung aller Tiefziehmaterialien

Finishing set with 6 different instruments for finishing all thermoforming materials

Jeu d'élaboration avec 6 instruments différents pour élaborer tous les matériaux de thermoformage

Set di finitura con 6 strumenti diversi per la rifinitura di tutti i materiali da termoformatura

Set de acabado con 6 diferentes herramientas para el desarrollo de todos los materiales de termoformado



1 Stichfräser für grobes Ausschneiden hohe Drehzahl (> 20 000 U/min) Schutzbrille

1 separating cutter for rough cutting high revolutions (> 20 000 rpm) safety goggles

1 fraise à séparer pour découper grossièrement grand nombre de tours (> 20 000 t/min) lunettes protectrices

1 fresa da taglio per taglio rapido ad alta velocità (> 20 000 giri/min) utilizzare occhiali di protezione

1 fresa de corte para el devastado de alta velocidad (> 20 000 rev/min) gafas protectoras



2 HSS-Spiralbohrer für feines Ausschneiden hohe Drehzahl (> 20 000 U/min) ohne Druck arbeiten! Schutzbrille

2 HSS-twist drills for more precise contours high revolutions (> 20 000 rpm) work without load! safety goggles

2 HSS-forets hélicoïdaux pour découper des contours fins grand nombre de tours (> 20 000 t/min), travailler sans pression! lunettes protectrices

2 frese a spirale HSS per taglio di precisione ad alta velocità (> 20 000 giri/min) lavorare senza esercitare pressione! utilizzare occhiali di protezione

2 brocas espirales HSS para contornear de alta velocidad (> 20 000 rev/min) ¡Trabajar sin presionar! gafas protectoras



1 Hartmetallfräser zum Beschleifen hohe Drehzahl (> 20 000 U/min) Schutzbrille

1 carbide bur for grinding high revolutions (> 20 000 rpm) safety goggles

1 fraise en métal dur pour abraser grand nombre de tours (> 20 000 t/min) lunettes protectrices

1 fresa in metallo duro per molaggio ad alta velocità (> 20 000 giri/min) utilizzare occhiali di protezione

1 fresa de carburo para fresar de alta velocidad (> 20 000 rev/min) gafas protectoras




1 Liskosil-I, zum Beschleifen und fein Vorpolieren großflächiger Bereiche, max. 10 000 U/min Schutzbrille

1 Liskosil-I, for grinding and fine prepolishing of larger areas max. 10 000 rpm safety goggles

1 Liskosil-I, pour abraser et prépolir finement des surfaces grandes, max. 10 000 t/min lunettes protectrices

1 Liskosil-I, rifinire e precludare aree estese max. 10 000 giri/min utilizzare occhiali di protezione

1 Liskosil-I, para un pre-pulido fino de áreas extendidas máx. 10 000 rev/min gafas protectoras

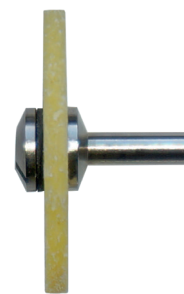


1 Liskosil-M, zum Beschleifen und fein Vorpolieren enger Bereiche, max. 10 000 U/min Schutzbrille

1 Liskosil-M, for grinding and fine prepolishing of narrow areas max. 10 000 rpm safety goggles

1 Liskosil-M, pour abraser et prépolir finement des zones restreintes max. 10 000 t/min lunettes protectrices

1 Liskosil-M, rifinire e precludare zone interdentali strette max. 10 000 giri/min utilizzare occhiali di protezione

1 Liskosil-M, para un pre-pulido fino de zonas interdental estrechas máx. 10 000 rev/min gafas protectoras

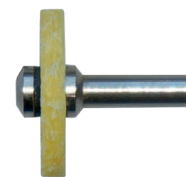

1 Liskosil-S, Bearbeitung occlusaler Frühkontakte und Schieneninnenseiten, max. 10 000 U/min Schutzbrille

1 Liskosil-S, treatment of occlusal premature contacts and inside of splints max. 10 000 rpm safety goggles

1 Liskosil-S, pour travailler des contacts prématurés occlusals et l'intérieure des gouttières max. 10 000 t/min lunettes protectrices

1 Liskosil-S, trattamento dei pre-contatti occlusali e l'interno dei splint max. 10 000 giri/min utilizzare occhiali di protezione

1 Liskosil-S, tratamiento de los pre-contactos oclusales y el interior de las férulas máx. 10 000 rev/min gafas protectoras

Lieferformen/delivery forms/forme de livraison/
confezionamento/formato de suministro

Stichfräser
separating cutter
fraise à séparer
fresa da taglio
fresa de corte

HSS-Spiralbohrer
HSS-twist drill
HSS-foret hélicoïdal
fresa a spirale HSS
broca espiral HSS

Hartmetallfräser
carbide bur
fraise en métal dur
fresa in metallo duro
fresa de carburo

Liskosil-I,
6 St./p.
1 x Mandrell/
mandrel/mandrin
mandrino/mandril

Liskosil-M,
6 St./p.
1 x Mandrell/
mandrel/mandrin
mandrino/mandril

Liskosil-S,
6 St./p.
1 x Mandrell/
mandrel/mandrin
mandrino/mandril

2 St./p. **110 836**

3 St./p. **110 876**

1 St./p. **110 837**

223 240

223 230

223 220