



Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

das Material, aus dem Ihre Schiene hergestellt wurde, kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mit Zusätzen versehen werden, die Verfärbungen vorbeugen.

Mögliche Verfärbungen sind weder gesundheits- noch materialschädigend und entstehen durch bestimmte, zur Mundflora gehörende Bakterien, durch Mikroblutungen im Bereich des beweglichen Zahnfleisches, durch einige Lösungen zur Mundspülung, durch einige Füllungsmaterialien und durch UV-Strahlung (z. B. Sonnenlicht).

Die aus Tiefziehmaterialien hergestellten Apparaturen (Schiene) sollten wie folgt gereinigt und gepflegt werden:

**Beste Ergebnisse** werden mit **Oxydens** Reinigungstabletten für Zahnschienen erreicht.

Die speziell auf Zahnschienen abgestimmte Reinigungstablette entfernt Plaque und mineralische Ablagerungen, Gerüche und beugt Verfärbungen vor. Empfehlenswert ist das praktische Oxydens Clean-set zur hygienischen Handhabung und Aufbewahrung.

(Oxydens Clean-set: 280 030, 32 Tabletten, 1 Clean-box, 1 Clean-cup)

**Alternativ** können Zahnschienen auch mit klassischer Seife, Kernseife und Flüssigseife gereinigt werden. Keine stark parfümierten Seifen benutzen.

*Nicht geeignet* sind alkoholhaltige Reinigungslösungen (ggf. Aufquellen) und Zahnpasta (enthält Schleifkörper), Mundspülungen (ggf. Verfärbung) und heißeres Wasser als 50 °C (Verformung).

Empfehlung:

- Vor dem Einsetzen die Zähne reinigen und die Schiene mit Wasser abspülen.
- Nach dem Gebrauch der Schiene, diese gut mit Wasser abspülen und Oxydens gemäß Anleitung anwenden.  
Wenn Oxydens nicht zur Hand, mit einer Zahnbürste und Seife die Innen- und Außenseite der Schiene gründlich reinigen. Erneut gut mit Wasser abspülen. Wasser abschütteln oder mit einem Handtuch abtrocknen.
- Nie trockenföhnen - Verformung!
- Sehr wichtig, die Schiene komplett trocknen lassen!  
An einem trockenen Ort aufbewahren, am besten in einer Zahnbox mit Lüftungslöchern, z. B. Erkobox (215 030), Splintbox (214 020) oder Oxydens Clean-box (280 031) von Erkodent.

Mit freundlichen Grüßen

Erkodent Erich Kopp GmbH  
Siemensstr.3  
D-72285 Pfalzgrafenweiler  
[www.erkodent.com](http://www.erkodent.com)  
[info@erkodent.com](mailto:info@erkodent.com)  
Tel.: +49 (0) 7445-8501-0  
Fax: +49 (0) 7445-2092