



Chers clients,

Pour des raisons de santé le matériau duquel votre gouttière a été réalisée ne peut pas être prévu avec des additives qui préviennent des décolorations.

Des décolorations possibles ne sont pas nocives ni pour la santé ni pour le matériau. Elles proviennent des certaines bactéries appartenant à la flore buccale, des micro-saignements dans la zones des gencives mobiles, par quelques solutions pour bains de bouche, par quelques matériaux d'obturation et par du rayonnement UV (par ex. lumière solaire).

Les appareils fabriqués en matériaux de thermoformage (gouttières) devraient être nettoyés et soignés comme suit:

Des **meilleurs résultats** sont obtenus avec les tablettes à nettoyage **Oxydens** pour des appareils dentaires.

La tablette est spécialement optimisée pour des appareils dentaires et enlève la plaque, des dépôts minéraux, des odeurs et prévient des décolorations. Il est recommandé d'utiliser l'Oxydens Clean-set pratique pour un maniement et stockage hygiénique.

(Oxydens Clean-set: 280 030, 32 tablettes, 1 Clean-box, 1 Clean-cup)

**Alternativement** les appareils dentaires peuvent également être nettoyés avec du savon classique, du savon neutre et du savon liquide. Ne pas utiliser des savons intensivement parfumés.

*Ne pas approprié* sont des nettoyants que contiennent de l'alcool (le cas échéant, gonflement) et des pâtes dentifrices (contiennent des particules abrasives), des bains de bouche (le cas échéant, décoloration) et de l'eau plus chaude que 50 °C (déformation).

Recommandation:

- Avant insertion nettoyer les dents et laver la gouttière avec de l'eau.
- Après l'usage de la gouttière veuillez la bien laver avec de l'eau et utiliser Oxydens selon les instructions.  
Si Oxydens n'est pas à la main, soigneusement nettoyer le côté intérieur et extérieur de la gouttière en utilisant une brosse à dents et du savon. De nouveau bien laver avec de l'eau. Secouer la gouttière ou sécher avec un essuie-main.
- Jamais sécher en utilisant un sèche-cheveux - déformation!
- Il est très important de laisser la gouttière complètement sécher!  
Garder à un lieu sec, de préférence dans une boîte qui a des trous d'aération comme l'Erkobox (215 030), le Splintbox (214 020) ou l'Oxydens Clean-box (280 031) de Erkodent.

Meilleures salutations,

Erkodent Erich Kopp GmbH  
Siemensstr.3  
D-72285 Pfalzgrafenweiler  
[www.erkodent.com](http://www.erkodent.com)  
[info@erkodent.com](mailto:info@erkodent.com)  
Tel.: +49 (0) 7445-8501-0  
Fax: +49 (0) 7445-2092