

Quick 2

Ausarbeitungsset mit 6 verschiedenen Instrumenten zur Ausarbeitung aller Tiefziehmaterialien.

Finishing set with 6 different instruments for finishing all thermoforming materials.

Jeu d'élaboration avec 6 instruments différents pour élaborer tous les matériaux de thermoformage.

Set di finitura con 6 strumenti diversi per la rifinitura di tutti i materiali di termoformatura

Set de acabado con 6 diferentes herramientas para el desarrollo de todos los materiales de termoformado



1 Stichfräser
für grobes Ausschneiden
hohe Drehzahl
(<20 000 U/min.)
Schutzbrille

1 separating cutter
for rough cutting
high revolutions
(<20 000 r.p.m.)
safety goggles

1 fraise à séparer
pour découper
grossièrement
grand nombre de tours
(>20 000 t/min.)
lunettes protectrices

1 fresa da taglio
per sgrossare
grossolanamente
ad alta velocità
(<20 000 giri/min.)
utilizzare
occhiali di protezione

1 fresa
para el devastado
de alta velocidad
(<20 000 rev/min.)
gafas protectoras



2 HSS-Spiralbohrer
für feines Ausschneiden
hohe Drehzahl
(<20 000 U/min.)
ohne Druck arbeiten!
Schutzbrille

2 HSS-twist drill
for more precise contours
high revolutions
(<20 000 r.p.m.)
work without load!
safety goggles

2 HSS-foret hélicoïdal
pour découper des
contours fins
grand nombre de tours
(>20 000 t/min.)
travailler sans pression!
lunettes protectrices

2 fresa a spirale HSS
per taglio di precisione
ad alta velocità
(<20 000 giri/min.)
lavorare senza esercitare
pressione! utilizzare
occhiali di protezione

2 brocas HSS-twist
para contornear
de alta velocidad
(<20 000 rev/min.)
¡Trabajar sin presionar!
gafas protectoras




1 Hartmetallfräser
zum Beschleifen
hohe Drehzahl
(<20 000 U/min.)
Schutzbrille

1 carbide bur
for grinding
high revolutions
(<20 000 r.p.m.)
safety goggles

1 fraise en métal dur
pour abraser
grand nombre de tours
(>20 000 t/min.)
lunettes protectrices

1 fresa in metallo duro
per molaggio
ad alta velocità
(<20 000 giri/min.)
utilizzare
occhiali di protezione

1 fresa de carburo
para fresar
de alta velocidad
(<20 000 rev/min.)
gafas protectoras

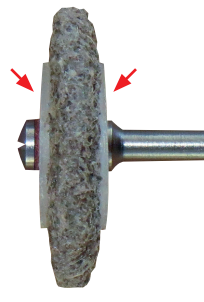

1 Lisko-B, grob
zum Beschleifen und
grob Vorpulieren
niedrige Drehzahl
(6 000 - 10 000 U/min.)
Schutzbrille

1 Lisko-B, coarse
for grinding and
coarse prepulishing
low revolutions
(6 000 - 20 000 r.p.m.)
safety goggles

1 Lisko-B, gros
pour abraser et prépolir
grossièrement
bas nombre de tours
(6 000 - 20 000 t/min.)
lunettes protectrices

1 Lisko-B, grossa
rettificare e precludare
taglio grossolano
a bassa velocità
(6 000 - 20 000 giri/min.)
utilizzare
occhiali di protezione

1 Lisko-B, grano basto
para un pre-pulido grueso
de baja velocidad
(6 000 - 20 000 rev/min.)
gafas protectoras




1 Lisko-S, fein
zum Beschleifen und
fein Vorpulieren
niedrige Drehzahl
(6 000 - 10 000 U/min.)
Schutzbrille

1 Lisko-S, fine
for grinding and
fine prepulishing
low revolutions
(6 000 - 20 000 r.p.m.)
safety goggles

1 Lisko-S, fin
pour abraser et
prépolir finement
bas nombre de tours
(6 000 - 20 000 t/min.)
lunettes protectrices

1 Lisko-S, fine
rettificare e precludare
taglio fine
a bassa velocità
(6 000 - 20.000 giri/min.)
utilizzare
occhiali di protezione

1 Lisko-S, grano fino
para un pre-pulido fino
de baja velocidad
(6 000 - 20 000 rev/min.)
gafas protectoras

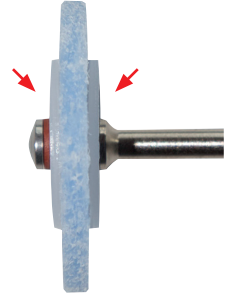

1 Liskoid, fein
wie Lisko-S, für
enge Bereiche
mittlere Drehzahl
(10 000 - 15 000 U/min.)
Schutzbrille

1 Liskoid, fine
as Lisko-S,
for narrow spaces
average revolutions
(10 000 - 15 000 r.p.m.)
safety goggles

1 Liskoid, fin
comme Lisko-S, pour
des zones restreintes
moyen nombre de tours
(10 000 - 15 000 t/min.)
lunettes protectrices

1 Liskoid, fine
come Lisko-S, per zone
interdentali strette
a media velocità
(10 000 - 15 000 giri/min.)
utilizzare
occhiali di protezione

1 Liskoid, fino
como Lisko-S, para
zonas estrechas
media velocidad
(10.000 - 20 000 rev/min.)
gafas protectoras

Lieferformen/delivery forms/forme de livraison/
forma di consegna/ formato de suministro

Stichfräser
separating cutter
fraise à séparer
fresa da taglio
fresa de corte


HSS-Spiralbohrer
HSS-twist drill
HSS-foret hélicoïdal
fresa a spirale HSS
brocas espirales HSS

Hartmetallfräser
carbide bur
fraise en métal dur
fresa in metallo duro
fresa de carburo

2 St./p. **110 836**

3 St./p. **110 876**

1 St./p. **110 837**

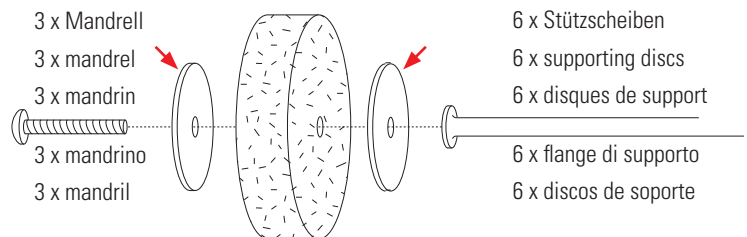

Lisko-B,
grob, coarse, gros,
grosso, basto

Lisko-S,
fein, fine, fin,
fine, fino

Liskoid,
fein, fine, fin,
fine, fino

10 St./p. **223 300**
4 x Stützscheiben
4 x supporting discs
4 x disques de support
4 x flange di supporto
4 x discos de soporte

10 St./p. **223 200**
4 x Stützscheiben
4 x supporting discs
4 x disques de support
4 x flange di supporto
4 x discos de soporte

6 St./p. **223 205**
4 x Stützscheiben
4 x supporting discs
4 x disques de support
4 x flange di supporto
4 x discos de soporte

Erkodent Erich Kopp GmbH • Siemensstraße 3 • 72285 Pfalzgrafenweiler
Germany • Tel. + 49 (0) 74 45/85 01-0 • Fax + 49 (0) 74 45/20 92
info@erkodent.com • www.erkodent.com

